

# Flect'EXPERT

## PATCH ARNICA

Flect'Expert Patch Arnica est un patch à effet froid basé sur la technologie Hydrogel. Le patch procure, dès son application, un effet froid qui soulage les zones douloureuses, sa structure douce et confortable protège la zone traitée et la teneur élevée en eau purifiée dans l'hydrogel contribue à la maintenir hydratée.

La technologie Hydrogel permet un retrait facile et indolore du patch.

### INDICATIONS

Flect'Expert Patch Arnica soulage les traumatismes, entorses ou foulures, les bosses, les ecchymoses, etc. Le Patch Arnica soulage et protège toute zone douloureuse due à un traumatisme, pouvant être lié à la pratique d'une activité sportive.

### PRÉSENTATION

Boîte contenant 5 patches (10 x 14 cm) emballés dans un sachet refermable, avec un filet de maintien.

### FORME ET COMPOSITION

#### Chaque patch contient :

Menthol, lactate de menthyle, extrait de marron d'Inde (*Aesculus Hippocastanum*), arnica, gélatine, povidone K90, méthylparahydroxybenzoate, propylparahydroxybenzoate, solution de sorbitol à 70%, kaolin, propylène glycol, édétate de sodium (EDTA), acide tartrique, dioxyde de titane,

carmellose sodique (CMC), glycinat d'aluminium, 1,3-butylène glycol, polysorbate 80, polyacrylate de sodium, eau purifiée.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Patch conforme et découpable : il s'adapte facilement aux différentes zones du corps.

1. Nettoyer et sécher la zone concernée.

2. Enlever le film protecteur du patch.

3. Appliquer le patch sur la zone concernée, en le découpant éventuellement pour lui donner la forme et la dimension adéquates.

4. Sur les zones du corps où l'application peut être plus difficile (genoux, coudes, chevilles, poignets...), le patch peut éventuellement être maintenu sur la surface à traiter au moyen du filet de maintien inclus dans la boîte.

5. Laisser le patch en place sur la zone à traiter, jusqu'à disparition de la sensation bénéfique. Pour retirer le patch, soulever un bord et tirer délicatement.

La durée de l'effet froid est subjective, et cet effet se dissipe de toute façon au bout de quelques heures.

### MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser plus d'un patch de Flect'Expert Patch Arnica par application.

Ne pas utiliser Flect'Expert Patch Arnica si l'emballage est endommagé.

Le produit doit uniquement être appliqué sur une peau intacte et saine et ne doit pas être porté pendant le bain ou la douche. Ne pas appliquer sur les yeux ou autour de ceux-ci, ni sur les muqueuses.

Ne pas utiliser le produit en même temps que d'autres traitements topiques éventuellement appliqués sur la zone à traiter.

En cas de doute au sujet de l'utilisation de Flect'Expert Patch Arnica, consultez votre médecin.

Pour usage externe uniquement. Ne pas avaler.

Les patches contenus dans la boîte de Flect'Expert Patch Arnica sont destinés à un usage unique et ne peuvent être réutilisés. Une fois utilisé, éliminer le produit conformément à la réglementation en vigueur.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

### CONTRE-INDICATIONS


Flect'Expert Patch Arnica ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue à un ou plusieurs composants. Ne pas utiliser sur une peau endommagée, indépendamment du type de lésion.



**Flect'EXPERT**  
**PATCH ARNICA**



(F)/155)  
1291 Ed. 1/0622

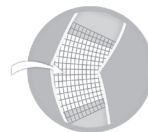

**GROSSESSE** : il n'existe aucun lien entre l'utilisation de Flect'Expert Patch Arnica et la survenue d'effets indésirables pendant la grossesse ou d'éventuelles malformations chez le nouveau-né. Toutefois, l'utilisation de Flect'Expert Patch Arnica n'est pas recommandée, à moins d'une nécessité absolue. Dans ce cas, adressez-vous à votre médecin qui pourra vous conseiller.

## INTERACTIONS

A ce jour, aucune interaction entre les composants de Flect'Expert Patch Arnica et d'autres médicaments n'a été rapportée.

## CONSERVATION

Ne pas utiliser au-delà de la date d'expiration indiquée sur l'emballage. Conserver dans un endroit frais et sec. Conserver à l'abri de la lumière du soleil et à l'écart de sources de chaleur.



IBSA Pharma SAS  
Parc de Sophia-Antipolis  
Les 3 Moulins - 280, rue de Goa  
06600 ANTIBES - France

Date de la dernière révision de la notice : **Juin 2022**



Attention : consulter les précautions d'emploi



Date limite d'utilisation



Code de lot



Ne pas réutiliser



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé



Conserver à l'abri de la lumière du soleil



Consulter les instructions d'utilisation



Fabricant



Séparez les éléments avant de trier